

FlexMed

FlexMed P

Wahl der ersten Kontaktlinse	Choix de la première lentille	First contact lens choice
Die Verwendung von Messlinsen wird empfohlen	Emploi de lentilles de mesure recommandé	We suggest to use our trial set
Durchmesser und Basiskurve <ul style="list-style-type: none"> • $\varnothing_T = \text{HH-Durchmesser} - 1.00 \text{ mm}$ • r_O (Topographie) = r_{cfl} • Stärke $F'_V = F'_V$ Brille (HSA bei 0) 	Diamètre et rayon <ul style="list-style-type: none"> • $\varnothing_T = \text{diamètre cornéen} - 1.00 \text{ mm}$ • r_O (topographie) = r_{cfl} • Puissance $F'_V = F'_V$ lunettes (DVO à 0) 	Diameter and base curve <ul style="list-style-type: none"> • $\varnothing_T = \text{corneal diameter} - 1.00 \text{ mm}$ • r_O (topography) = r_{cfl} • Contact lens power: $F'_V = F'_V$ (BVD = 0)
Randabflachung Mit mittlerer Abflachung (M) beginnen, entsprechend flacher (F) oder steiler (S) gemäß Fluobild.	Dégagement Commencer avec dégagement standard (M) -> passer au plat (F) ou serré (S) selon fluoroscopie.	Flattening Start with medium flattening (M), then adjust steeper or flatter according to fluoroscopy.
Hinweise <ul style="list-style-type: none"> • Wenn keine optimale Anpassung möglich ist, auf Orbiflex SxS wechseln • Einfache Anpassung der einzelnen Parameter über das Online-Berechnungs-Tool „Rückflächen Gestaltung“ 	Conseils <ul style="list-style-type: none"> • En cas d'adaptation non satisfaisante, passer en SxS • Commander la lentille définitive par Internet en utilisant l'assistant «Géométrie face postérieure» 	Advice <ul style="list-style-type: none"> • If the adaptation is not satisfactory, try Orbiflex SxS for fine tuning • Order the definitive contact lens on line using the form "Back surface design"
Mehrstärkensystem und zentrale optische Zone (Zoc) Siehe Boriflex S. 28	Système de progression et zone optique centrale (Zoc) Voir Boriflex p. 28	Progression system and central optic zone (Zoc) See Boriflex p.28

Anpassleitfaden siehe auch S. 37 / Conseils d'adaptation voir aussi p. 37 / Fitting advice see also p. 37

FlexMed**FlexMed P****Technische Daten****Données techniques****Technical data**

\varnothing_T	Gesamtdurchmesser	Diamètre total	Total diameter	7.50 => 12.00 mm
r_0	Basiskurve	Rayon	Base curve	6.00 => 9.00 mm
F_v	Sphäre	Sphère	Sphere	-40.00 => +40.00 dpt
Add	Addition	Addition	Addition	+0.50 => +4.00 dpt
I_{EA}	Abflachung	Dégagement	Flattening	
				Standard
			2 parametrierbare periphere Zonen 2 zones paramétrables en périphérie 2 customisable peripheral zones	$r_1 = 8.30$ mm $r_2 = 8.70$ mm $\varnothing_1 = 9.00$ mm $\varnothing_2 = 11.00$ mm
Zoc	Siehe Boriflex S. 29	Voir Boriflex p. 29	See Boriflex p. 29	

Modifizierbare Sekundärparameter, siehe S. 38 / Paramètres secondaires modifiables, voir p. 38 / *Modifiable secondary parameters, see p. 38*

Geometrie**Géométrie****Geometry**

- Sphärische optische Zone auf der Rückfläche
- Zwei sphärische Abflachungen (IEA / IER negativ)

FlexMed

- Sphärische optische Zone auf der Vorderfläche

FlexMed P

- Sphärische optische Zone auf der Vorderfläche Bifocal (Bf) / Simple progressive (Sp) / Multi Progressive (Mp)

- Zone optique postérieure sphérique
- Dégagement sphérique bi-courbe inverse (IEA / IER négatif)

FlexMed

- Zone optique antérieure sphérique

FlexMed P

- Zone optique antérieure sphérique Bifocal (Bf) / Simple progressive (Sp) / Multi progressive (Mp)

- Spherical back optic zones
- Two spherical flattenings (negative IEA / IER)

FlexMed

- Spherical front optic zone

FlexMed P

- Front optic zone Bifocal (Bf) / Simple progressive (Sp) / Multi progressive (Mp)

