

OCULUS Keratograph Exportprogramm für SwissLens einrichten

1. Oculus Keratograph updaten OCULUS®

Bitte wenden Sie sich direkt an den Oculus Service. Dieser wird Ihnen beim Update helfen.


Dieses Update steht nur Schnittstellen ab der Version 2.5r18 und Keratographen der 3. Generation (und jünger) zur Verfügung

Deutschland: Tel.: +49 (0641) 2005-800
E-Mail: service@oculus.de

Schweiz: Tel.: +41 44 738 22 22 (Firma von Hoff)
E-Mail: info@vonhoff.ch

Österreich: Tel.: +43/1/979 88 44 (Firma Askin)
E-Mail: askin@askin.co.at

2. Eine Untersuchung eines beliebigen Patienten auswählen

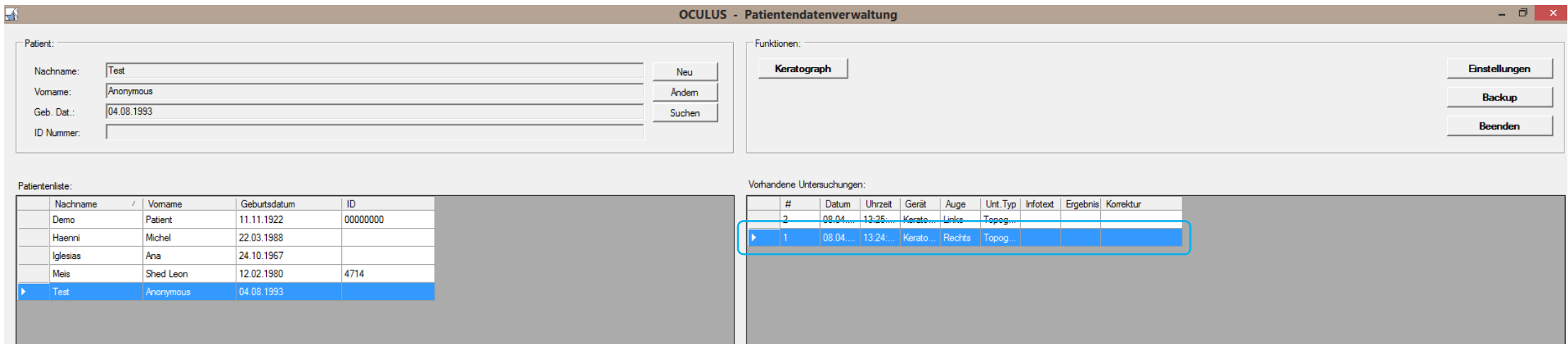

Patient:

Nachname:

Vorname:

Geb. Dat.:

ID Nummer:

Patientenliste:


Nachname	Vorname	Geburtsdatum	ID
Demo	Patient	11.11.1922	00000000
Haenni	Michel	22.03.1988	
Iglesias	Ana	24.10.1967	
Meis	Shed Leon	12.02.1980	4714
▶ Test	Anonymous	04.08.1993	

Funktionen:


Vorhandene Untersuchungen:

#	Datum	Uhrzeit	Gerät	Auge	Unt. Typ	Infotext	Ergebnis	Korrektur
2	08.04.2008	13:25:...	Kerato...	Links	Topog...			
▶ 1	08.04.2008	13:24:...	Kerato...	Rechts	Topog...			


3. Exportprogramm einstellen und aktivieren

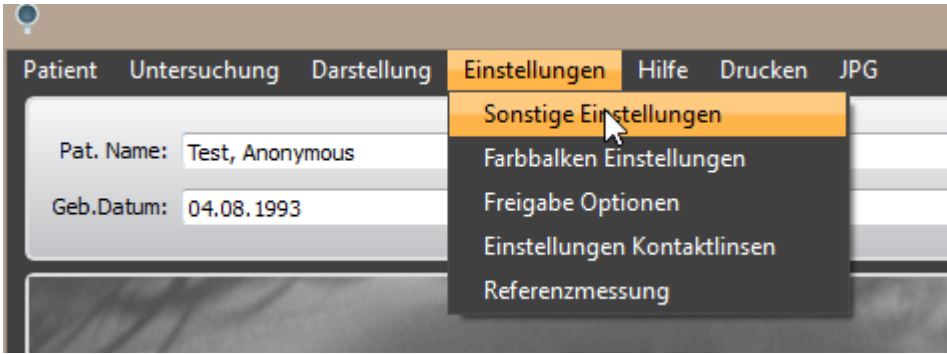

Unter **Einstellungen**,
Sonstige Einstellungen wählen

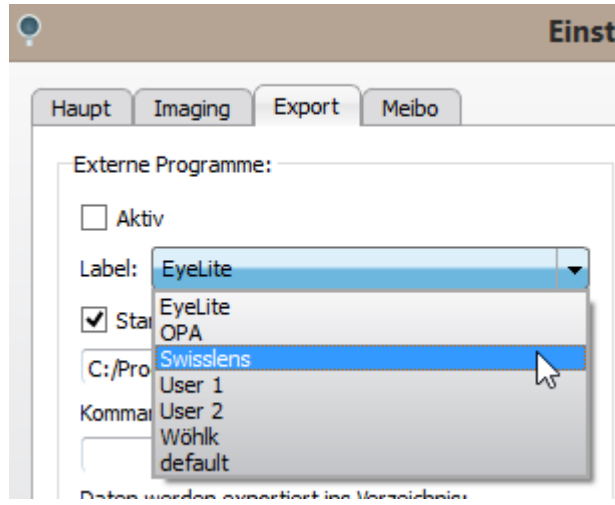


In der Kartei **Export**
 das Label: **Swisslens**
 wählen

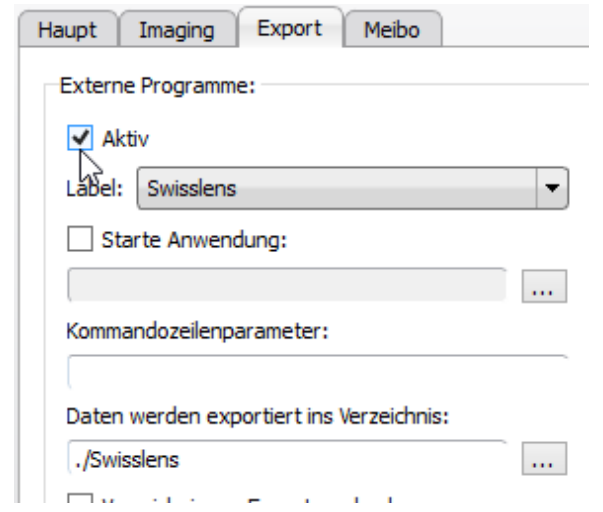



Mit dem Häkchen das
 Programm aktivieren **Aktiv**

4. Speicherplatz wählen

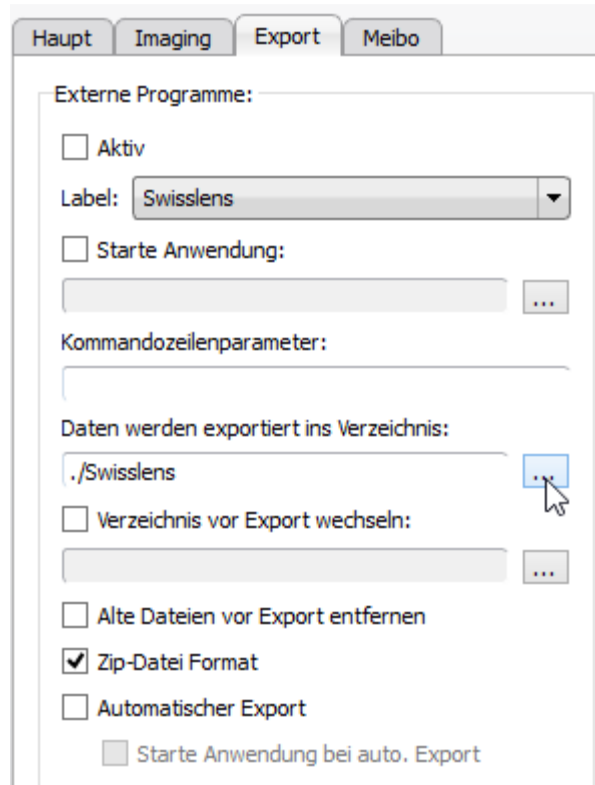



Voreingestellt ist der Speicherort unter C:/TOPO/Swisslens

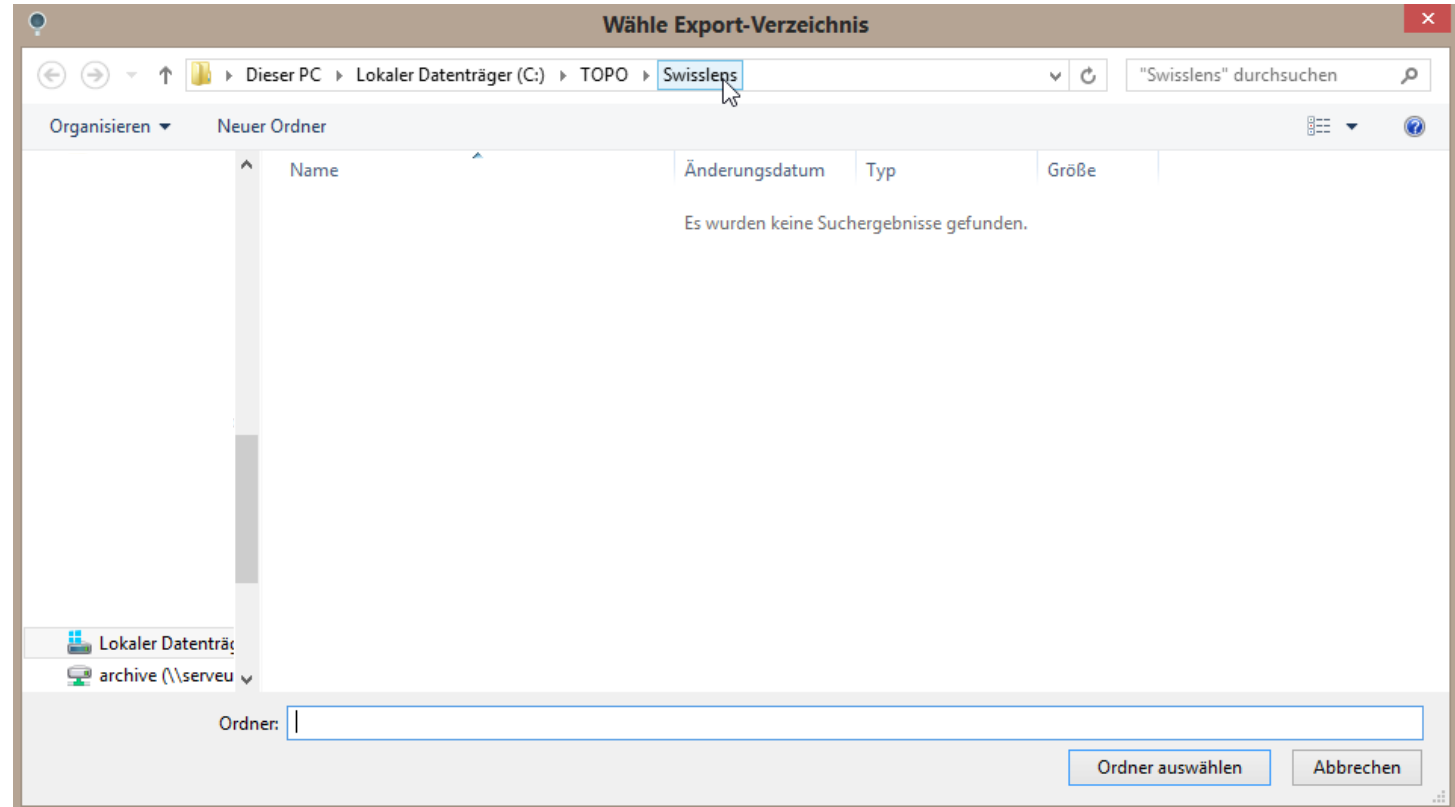


Falls Sie diesen ändern möchten (z.B. bei Netzwerken und bei Rechner ohne Internetzugang), können Sie den Speicherplatz dauerhaft ändern. 

5. Untersuchung exportieren

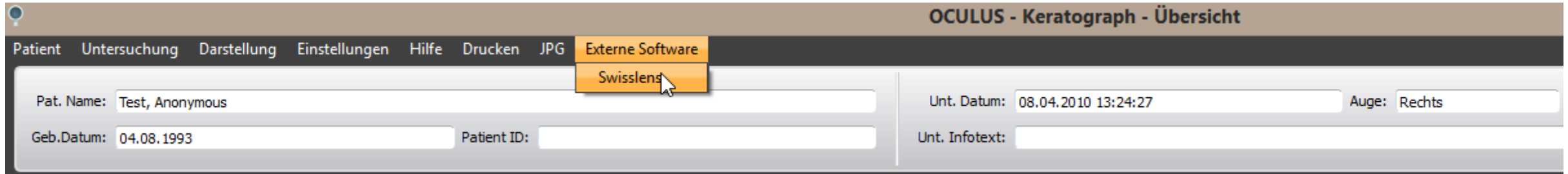


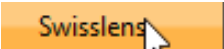Sobald Sie den Export aktiviert haben erscheint in der Untersuchung ein neues Feld «Externe Software» mit dem Label . Nachdem Sie auf Swisslens geklickt haben, ist die Untersuchung am eingestellten Ort abgespeichert.

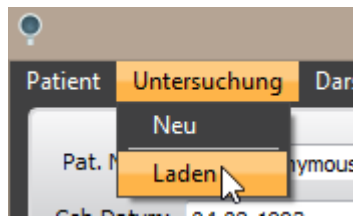

Für die andere Seite zu exportieren, müssen Sie die gewünschte Untersuchung auswählen und wieder auf das Label  klicken.

#	Icon	Datum	Auge	Typ	Infotext
2		08.04.2010 13:25:25	Links	Topography	
1		08.04.2010 13:24:27	Rechts	Topography	

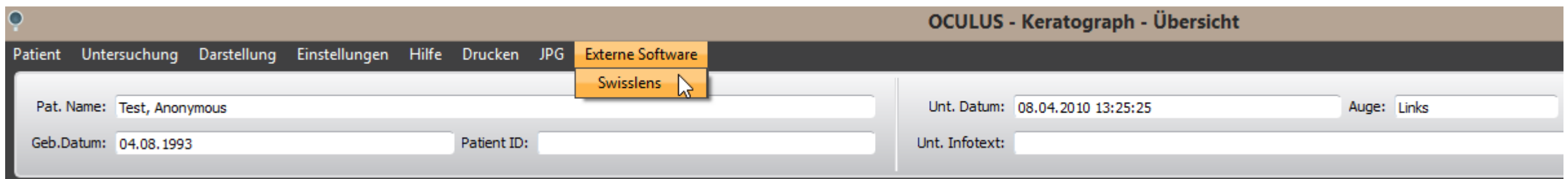



www.swisslens.ch

Internetservices für Kontaktlinsenanpasser

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

per Email: lens.info@swisslens.ch

per Telefon:

Schweiz:	+41 (0) 21 620 60 68
Deutschland:	+49 (0) 180 566 68 16
Österreich:	+43 (0) 810 23 23 16